



ZCA1A HOSPITALIER





[www.corona-medical.com](http://www.corona-medical.com)

A word cloud of French terms including: Solidité, confort, Sécurité, Hygiène, NF medical, and NF santé. The words are scattered across the page in various sizes and orientations, with some appearing more prominently than others.

Solidité

Corona Médical **CRÉATEUR DE MIEUX-ÊTRE**

Corona Médical **CRÉATEUR DE MIEUX-ÊTRE**



**EXEMPLES** p.9  
de chambres

SOINS COURANTS STANDARD / SOINS COURANTS  
SOINS DE SUITE / MATERNITÉ / SOINS INTENSIFS  
SOINS BARIATRIQUES



**LITS** p.29  
et accessoires

X-TYPE L5 / X-TYPE L8  
CANTOU / X-TYPE DP L8  
PI-TYPE L8 / BARIATRIQUE



**PANNEAUX** p.64  
et accessoires



**MOBILIER** p.77  
et tables adaptables



**FAUTEUILS** p.85  
repos et transfert



**AGENCEMENT** p.92  
et SAV  
AGENCEMENT / SAV / ENVIRONNEMENT





Corona Médical / **NOS VALEURS**

Les chambres en hôpital, cliniques ou autres établissements de soins, sont des espaces où se côtoient les patients, leur famille et le personnel soignant.

POUR LE MEILLEUR ÊTRE DE TOUS, CORONA MÉDICAL CONÇOIT SES PRODUITS AUTOUR DE 4 VALEURS

**SÉCURITÉ**  
du patient

**SOLIDITÉ**  
à l'usage dans le temps

**SÉCURITÉ &  
EFFICACITÉ**  
du personnel soignant



**RESPECT**  
de l'environnement





EXEMPLES  
de chambres

# LES CHAMBRES CORONA MÉDICAL ...

les chambres Corona Médical combinent le confort, la solidité, l'hygiène et la sécurité pour le patient ainsi que pour le personnel soignant.  
Un large choix de produits avec des finitions personnalisées permet d'aménager des chambres adaptées aux différentes pathologies

SOINS COURANTS STANDARDS/ p.13



SOINS COURANTS STANDARDS/ p.15



SOINS COURANTS/ p.17



SOINS DE SUITE/ p.19



MATERNITÉ/ p.21



SOINS INTENSIFS/ p.23



SOINS BARIATRIQUES/ p.25





**Lit X-TYPE L5**  
**Barrières pliantes intégrées**  
**Dosserets CLINICA**  
voir p.38

Le lit X-TYPE L5 destiné aux soins courants standards répondra parfaitement aux besoins du personnel soignant par sa simplicité et son approche économique.



**Chevet Artea MA-CHX-ART**  
voir p.80



**Table adaptable MA-T100**  
voir p.78



**Table**  
voir p.82





**Lit X-TYPE L8-PF**  
**Barrières pliantes intégrées**  
**Dosserets CLINICA**  
voir p.40

Le lit X-TYPE L8-PF destiné aux soins courants répondra parfaitement aux besoins du personnel soignant par sa **fonctionnalité**. La position fauteuil simplifiée apporte un confort et une grande autonomie aux patients.



**Chevet Artea MA-CHX-MA**  
voir p.80



**Table adaptable MA-T104**  
voir p.78



**Fauteuil MA-FA750-PRE+**  
voir p.86





**Lit X-TYPE L8**  
**Barrières pliantes intégrées**  
**Dosserets ULTIMA**  
voir p.42

Le lit X-TYPE L8 destiné aux établissements de soins courants, convainc par sa robustesse, sa fonctionnalité et son confort au quotidien.



**Chevet MA-CHX-AB**  
voir p.80



**Table adaptable MA-T104**  
voir p.78



**Fauteuil MA-FA750-PRE+**  
voir p.86





**Lit CANTOU**  
Petites barrières pliantes intégrées  
Dosserets CLINICA - Tapis de sol  
voir p.44

Le lit CANTOU destiné aux soins de suite répondra parfaitement en terme de **sécurité**, à la **prévention des chûtes** par sa très faible hauteur, tout en conservant un **bon accès au soins** avec une hauteur variable d'amplitude importante.



**Chevet MA-CHX-MA**  
voir p.80



**Table adaptable MA-T100**  
voir p.78



**Fauteuil MA-FA750-PRE+**  
voir p.86





**Lit X-TYPE DP L8**  
**Barrières pliantes intégrées**  
**Dosserets ULTIMA**  
voir p.46

Le lit X-TYPE DP L8, avec sa robustesse, son confort et sa position fauteuil mécanique ou électrique conviendra parfaitement aux établissements de maternité



**Chevet MA-CHX-MA**  
voir p.80



**Table adaptable MA-T104**  
voir p.78



**Fauteuil MA-FA750-PRE+**  
voir p.86





**Lit PI-TYPE L8**  
**Barrières pliantes intégrées**  
**Dosserets Clinica tablette en pied**  
**et Clinica tête coulissante**  
voir p.48

Le lit PI-TYPE L8, tout en privilégiant l'hygiène et l'esthétisme, répondra parfaitement aux exigences des établissements de soins aigus par sa technicité et sa manoeuvrabilité.



**Chevet MA-CHX-AB**  
voir p.80



**Fauteuil MA-FA950-ABS**  
voir p.88





**Lit BARIATRIQUE**  
**Bbarrières pliantes réhaussées intégrées**  
**Dosserets Clinica**  
voir p.50

Le lit LA8520-HER,  
destiné aux établissements de soins  
pour les services de **soins courants**,  
de **soins intensifs** et aux établissements  
de **cure**, permet d'assurer le couchage d'une  
personne de forte taille grâce à sa surface  
de couchage de 110 cm de largeur  
pour un poids maximum de 250 kg.



**Potence double LX-P1030-HER**  
voir p.72



**Chevet MA-CHX-AB**  
voir p.80





Comme tous les **produits certifiés NF Mobilier Santé**, nos produits sont conçus, fabriqués et contrôlés pour apporter le **maximum de garanties** en termes de **sécurité, hygiène, solidité et durabilité**, mais aussi en termes de **confort du patient et du soignant**.

## › SÉCURITÉ

Sécurité de contact (pas d'arêtes vives ni de zones de pincement des doigts accessibles, passage de doigt des poignées supérieur à 25 mm ou inférieur à 8 mm).

Stabilité à l'ouverture et à la charge, stabilité aux chocs frontaux ou latéraux, système anti-basculement lors de l'ouverture des tiroirs.

Sécurité dimensionnelle : nos produits répondent à des exigences dimensionnelles par rapport à la taille de l'utilisateur.

Comportement au feu : classement M1 pour les tissus et M3 pour le bois, ainsi nos produits répondent aux exigences en matière de réaction au feu.

## › HYGIÈNE

La conception de nos meubles permet une facilité de nettoyage :

- toutes les surfaces sont lessivables, pas de zones inaccessibles ou retenant les salissures.
- les tiroirs des chevets sont équipés de bacs amovibles lavables.

## › CONFORT

Ergonomie adaptée pour le soignant et le patient (hauteur et dimensions des meubles, hauteur variable des adaptables actionnées par vérin à gaz, facilité de préhension des poignées, effort de roulement des fauteuils inférieur à 125N).

## › SOLIDITÉ

Résistance aux fortes sollicitations pour un usage intensif (essais de chute, essais de charge des tiroirs,...).

## › LONGÉVITÉ

Tenue des surfaces aux produits d'entretien et aux produits courants (détergents, café, encre de stylo-bille, feutres...), résistance aux sollicitations liées à un long usage, jour après jour (40 000 ouvertures et fermetures de tiroirs et portes,...), résistance à l'abrasion, à la chaleur.




# LES LITS

et accessoires


# 4 CONFIGURATIONS SELON VOS BESOINS ...

Corona Medical propose un sommier unique et évolutif adaptable selon besoins


v17

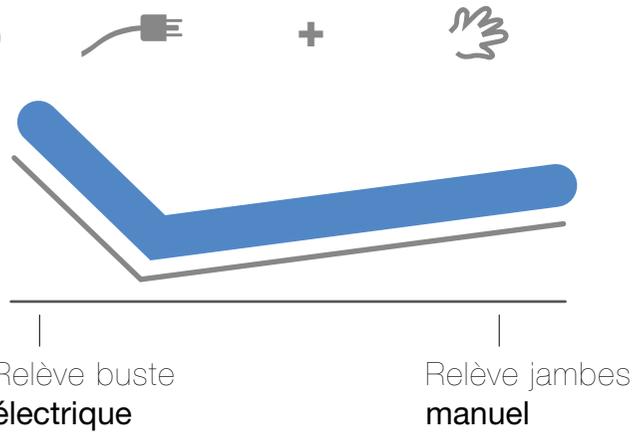


v19

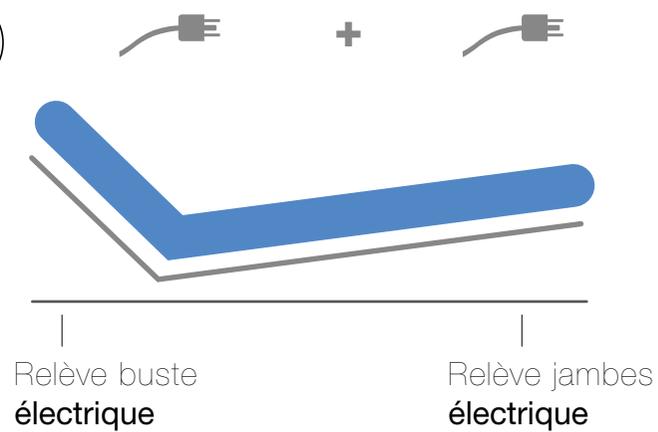

v18

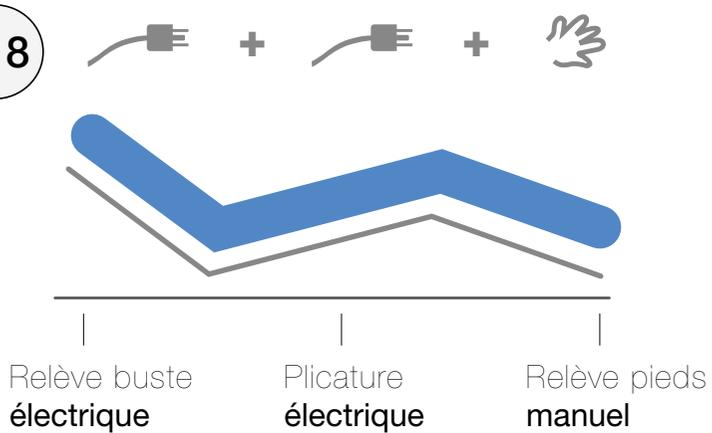

v20

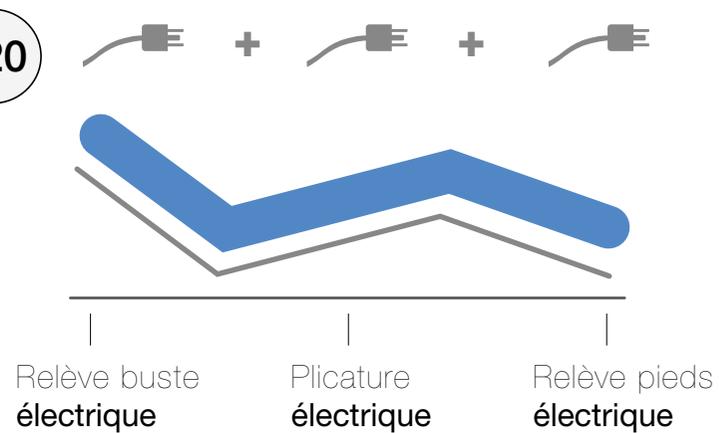

LE SEUL LIT DU MARCHÉ


# TOUT ÉLECTRIQUE (v20)



Relève Pieds électrique par télécommande

Plusieurs positions avec précision de l'inclinaison au degré près pour :

- Autonomie et confort au patient
- Le soulagement des jambes en cas de difficultés du système sanguin
- La réalisation des soins orthopédiques
- Positionner parfaitement les jambes par rapport à des pathologies "pointues"

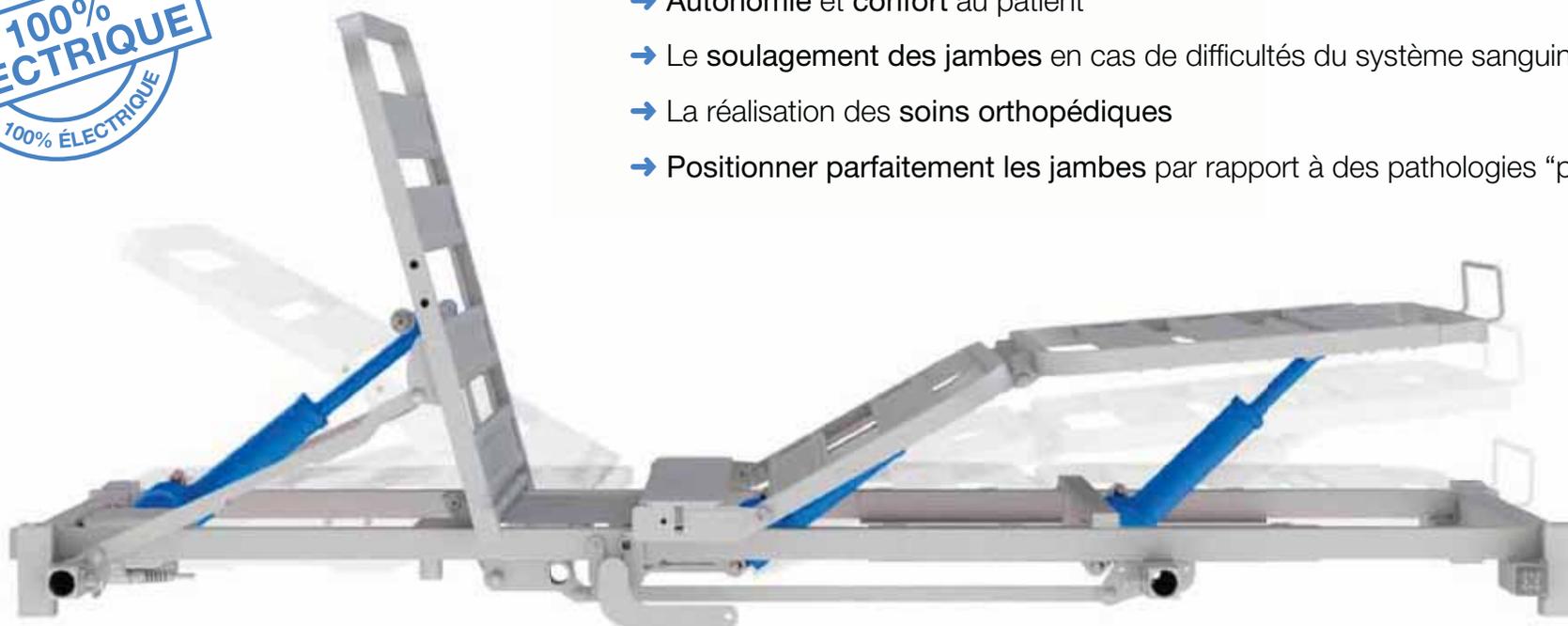

POSITION "SYNCHRO" :

Action simultanée du relèvement du buste et du relèvement des cuisses, ainsi le fessier ne glisse pas vers le pied du lit. Le personnel soignant n'a donc pas à soulever le patient pour le repositionner (limitation des risques de lombalgies, rapidité et gain de temps.)

## 3 SYSTÈMES D'ÉLEVATION ...



### SYSTÈME "CANTOU" :

Le système d'élévation "CANTOU" offre une position basse très faible pour prévenir des chutes tout en conservant une position haute conséquente pour le personnel soignant.



### SYSTÈME "PI-TYPE" :

Le système d'élévation "PI-TYPE" avec ces deux colonnes privilégie l'hygiène et l'esthétisme.



### SYSTÈME "X-TYPE" :

Le système d'élévation "X-TYPE" offre avec son croisillon sobre, une stabilité importante tout en respectant l'hygiène et l'esthétisme.

## POUR UNE PLATEFORME UNIQUE




- Une seule formation pour tous les utilisateurs de tous les lits (personnel soignant, brancardier,...)
- Un seul stock de pièces détachées
- Des accès soires compatibles sur tous les lits
- Conformité aux normes NF EN 60 601-2-38 et NF EN 1970
- Conformité à la marque NF 178 suivant modèles

NOTRE GAMME DE PRODUIT EST CONÇUE SUR UNE PLATEFORME UNIQUE  
AUTOUR D'UN CHÂSSIS HAUT STANDARDISÉ, NOUS POUVONS PROPOSER :

- 3 systèmes d'élévation (CANTOU, PI-TYPE ou X-TYPE)
- 2 plans de couchage (lattes ou compact)
- Différentes barrières de lit
- Un choix important de dossierets
- Un large choix d'accessoires

# UN SYSTÈME DE PLATEFORME UNIQUE /

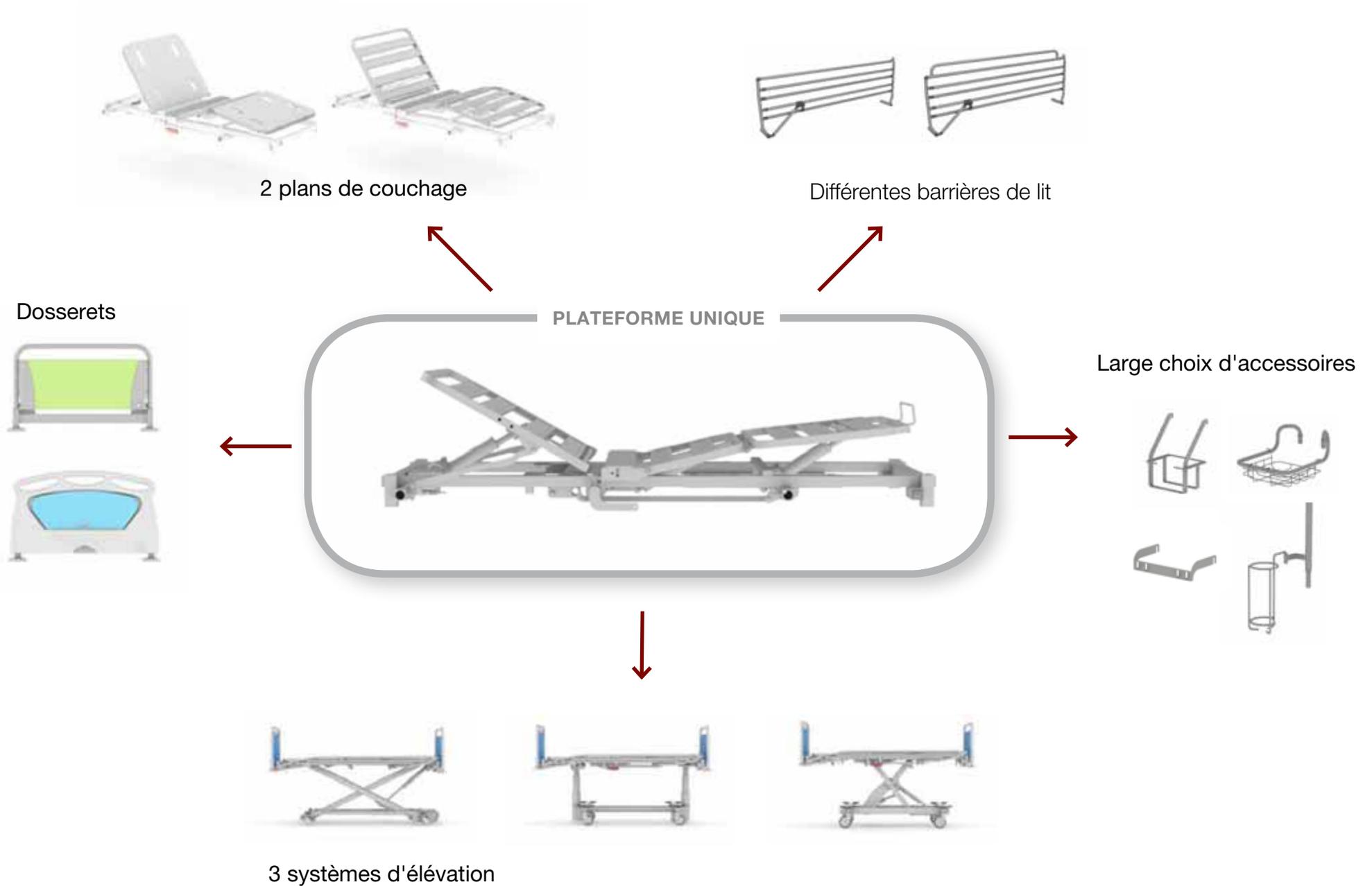



Corona Medical propose un choix de lits en fonction des destinations et des pathologies des patients.

Notre concept de lits hospitaliers est adapté aux clinique et aux hôpitaux tant en fonctionnalités (lits bas, lits Bariatrique) qu'en design.





Lit CANTOU

P.44



Lit X-TYPE DP L8

P.46



Lit PI-TYPE L8

P.48



Lit BARIATRIQUE

P.50



La robustesse, la praticité  
 et le confort du lit LA 5000  
 répondront parfaitement  
 aux exigences du patient comme  
 du personnel soignant tout en préservant  
 l'approche économique.

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### Freinage centralisé, sécurisé

Hauteur mini / maxi: **34 cm / 90 cm**

Dimension hors tout: **219 x 98 cm**

Poids maxi du résident: **135 kg**



**Position basse**  
 Minimum environ 34 cm



**Position haute**  
 Maximum environ 90 cm



**Angle relève buste**  
 Inclinaison de 0° à 70°



**Angle relève jambes**  
 Inclinaison de 0° à 30°



**Angle relève pieds**  
 Inclinaison de 0° à 20°

LIT **X-TYPE L5**

LA5000

**4 supports potence TPS**

Les emplacements en pied de lit permettent aussi de placer une potence afin de faciliter la sortie de lit du patient et diminuer le poids « à porter » pour le personnel soignant

**Relève buste électrique à translation**

L'angle du relève buste a été étudié afin d'éviter toute compression abdominale, et en cas de mouvement du lit, la plicature évite que le patient glisse vers le pied du lit

**Dosseret de lit**

Vous pouvez choisir ou créer votre style à partir de la sélection de dosserets p.64



Hauteur **mini** : 34 cm  
Hauteur **maxi** : 90 cm

**Modèle équipé de barrières métal**  
(plusieurs barrières au choix, voir p.67)

La barrière médicalisée ne doit être utilisée que sur recommandation médicale.

**Freinage centralisé, sécurisé**

Corona Médical vous aide à ne pas oublier d'actionner le freinage du lit ce qui pourrait engendrer une chute des patients et ceci grâce à sa mise en place automatique en position basse du lit



La simplicité, la praticité  
 et le confort du lit LA8000 POSITION FAUTEUIL  
 répondront parfaitement  
 à l'autonomie du patient ainsi qu'aux exigences  
 du personnel soignant.



**Position basse**  
 Minimum environ 34 cm



**Position haute**  
 Minimum environ 90 cm



**Position Fauteuil**  
 Inclinaison de 0° à 24°

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

**Freinage centralisé, sécurisé**

Hauteur mini / maxi: **34 cm / 90 cm**

Dimension hors tout: **219 x 98 cm**

Poids maxi du résident: **135 kg**



**Angle relève buste**  
 Inclinaison de 0° à 70°



**Angle relève jambes**  
 Inclinaison de 0° à 30°



**Angle relève pieds**  
 Inclinaison de 0° à 20°

## 4 supports potence TPS

Les emplacements en pied de lit permettent aussi de placer une potence afin de faciliter la sortie de lit du patient et diminuer le poids « à porter » pour le personnel soignant

## Relève buste

électrique à translation

L'angle du relève buste a été étudié afin d'éviter toute compression abdominale, et en cas de mouvement du lit, la plicature évite que le patient glisse vers le pied du lit

## Dosseret de lit

Vous pouvez choisir ou créer votre style à partir de la sélection de dosserets p.64

## Position Fauteuil

associée à la translation du buste et la plicature genoux pour un meilleur confort

Hauteur **mini** : 34 cm  
Hauteur **maxi** : 90 cm

## Modèle équipé de barrières métal

(plusieurs barrières au choix, voir p.67)

La barrière médicalisée ne doit être utilisée que sur recommandation médicale.

## Freinage centralisé, sécurisé

Corona Médical vous aide à ne pas oublier d'actionner le freinage du lit ce qui pourrait engendrer une chute des patients et ceci grâce à sa mise en place automatique en position basse du lit





La robustesse, la praticité et le confort du lit LA8000 répondront parfaitement aux exigences du patient comme du personnel soignant.

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimension hors tout : **219 x 98 cm**  
 Poids maxi du résident : **135 kg**  
 Hauteur mini / maxi : **36 cm / 86 cm**



**Position basse**  
 Minimum environ 36 cm



**Position haute**  
 Maximum environ 86 cm



**Angle relève buste**  
 Inclinaison de 0° à 70°



**Angle relève jambes**  
 Inclinaison de 0° à 30°



**Angle relève pieds**  
 Inclinaison de 0° à 20°

LIT **X-TYPE L8**

LA8000

**4 supports** potence TPS

Les emplacements en pied de lit permettent aussi de placer une potence afin de faciliter la sortie de lit du patient et diminuer le poids « à porter » pour le personnel soignant

**Relève buste**

électrique à translation

L'angle du relève buste a été étudié afin d'éviter toute compression abdominale, et en cas de mouvement du lit, la plicature évite que le patient glisse vers le pied du lit

**Dosseret** de lit

Vous pouvez choisir ou créer votre style à partir de la sélection de dosserets p.64



Hauteur **mini** : 36 cm  
Hauteur **maxi** : 86 cm

**Modèle équipé de barrières métal**

(plusieurs barrières au choix, voir p.67)

La barrière médicalisée ne doit être utilisée que sur recommandation médicale.

**Freinage** centralisé,  
1 roulette **directionnelle**



Le lit CANTOU présente une avancée décisive en matière de prévention des chutes avec sa très faible hauteur de 23 cm en position basse, tout en conservant une hauteur maximale avec matelas de 91 cm. La technique et le design s'harmonisent pour l'humanité des soins. Une option roue D.100 permet d'avoir une garde au sol de 15 cm conforme à la norme NF EN1970.

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

##### Freinage centralisé, sécurisé

Hauteur mini / maxi: **23 cm / 77 cm**

##### Freinage individuel

Hauteur mini / maxi: **19 cm / 77 cm**

Dimension hors tout: **219 x 98 cm**

Poids maxi du résident: **135 kg**



**Position basse**  
Minimum environ 23 cm



**Position haute**  
Maximum environ 77 cm



**Angle relève buste**  
Inclinaison de 0° à 70°



**Angle relève jambes**  
Inclinaison de 0° à 30°



**Angle relève pieds**  
Inclinaison de 0° à 20°

LIT **CANTOU**

LA8000-BAS

**4 supports potence TPS**

Les emplacements en pied de lit permettent aussi de placer une potence afin de faciliter la sortie de lit du patient et diminuer le poids « à porter » pour le personnel soignant

**Relève buste**

électrique à translation

L'angle du relèvement buste a été étudié afin d'éviter toute compression abdominale, et en cas de mouvement du lit, la plicature évite que le patient glisse vers le pied du lit

**Dosseret de lit**

Vous pouvez choisir ou créer votre style à partir de la sélection de dosserets p.64

Hauteur **mini** : 23 cm  
Hauteur **maxi** : 77 cm



**Le Matelas de sol**

est particulièrement étudié pour atténuer la chute des patients désorientés ou agités. Sa conception permet de le ranger au dos du dossier de tête de lit en cas de non utilisation, voir p.72

**Modèle équipé de barrières métal**

(plusieurs barrières au choix, voir p.67)  
La barrière médicalisée ne doit être utilisée que sur recommandation médicale.

**Freinage centralisé, sécurisé**

Corona Médical vous aide à ne pas oublier d'actionner le freinage du lit ce qui pourrait engendrer une chute des patients et ceci grâce à sa mise en place automatique en position basse du lit



Le lit X-TYPE DP, lit de soins courants, soins aigus, convainc par ses multiples positions et options :

- proclive / déclive manuelle
- proclive / déclive électrique
- position fauteuil

L'expérience hospitalière adaptée aux établissements de maternité.



**Position basse**  
Minimum environ 41 cm



**Position haute**  
Maximum environ 88 cm



**Angle relève buste**  
Inclinaison de 0° à 70°



**Angle relève jambes**  
Inclinaison de 0° à 30°



**Angle relève pieds**  
Inclinaison de 0° à 20°



**Déclive**  
Inclinaison de 0° à 16°



**Proclive**  
Inclinaison de 0° à 24°



**Position fauteuil**

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Hauteur mini : **41 cm**

Hauteur maxi : **88 cm**

Dimension hors tout : **219 x 98 cm**

Poids maxi du résident : **135 kg**

LIT **X-TYPE DP L8**

LA8000-DPM / LA8000-DPE

**4 supports** potence TPS

Les emplacements en pied de lit permettent aussi de placer une potence afin de faciliter la sortie de lit du patient et diminuer le poids « à porter » pour le personnel soignant

**Relève buste**

électrique à translation

L'angle du relève buste a été étudié afin d'éviter toute compression abdominale, et en cas de mouvement du lit, la plicature évite que le patient glisse vers le pied du lit

**Dosseret** de lit

Vous pouvez choisir ou créer votre style à partir de la sélection de dosserets p.64

Hauteur **mini** : 41 cm  
Hauteur **maxi** : 88 cm

**Freinage** centralisé,  
1 roulette **directionnelle**

**Proclive / Déclive**  
électrique

**Modèle équipé de barrières métal**  
(plusieurs barrières au choix, voir p.67)  
La barrière médicalisée ne doit être utilisée que sur recommandation médicale.





Le lit LA8500 combine toutes les fonctions exigées en soins courants, et en soins aigus, en privilégiant l'hygiène et l'esthétique. Son déplacement est aisé grâce à ses roulettes de 150 mm de diamètre et son blocage directionnel. La technique et la grande mobilité s'harmonisent au côté cosy et élégant.

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Hauteur mini : **47 cm**

Hauteur maxi : **87 cm**

Dimension hors tout : **219 x 98 cm**

Poids maxi du résident : **185 kg (V20)**



**Position basse**  
Minimum environ 47 cm



**Position haute**  
Maximum environ 87 cm



**Angle relève buste**  
Inclinaison de 0° à 70°



**Angle relève jambes**  
Inclinaison de 0° à 30°



**Angle relève pieds**  
Inclinaison de 0° à 20°



**Déclive**  
Inclinaison de 0° à 16°



**Proclive**  
Inclinaison de 0° à 16°



**Position fauteuil**

**4 supports potence TPS**

Les emplacements en pied de lit permettent aussi de placer une potence afin de faciliter la sortie de lit du patient et diminuer le poids « à porter » pour le personnel soignant

**Relève buste**

électrique à translation

L'angle du relève buste a été étudié afin d'éviter toute compression abdominale, et en cas de mouvement du lit, la plicature évite que le patient glisse vers le pied du lit

**Dosseret de lit**

Vous pouvez choisir ou créer votre style à partir de la sélection de dosserets p.64

Hauteur **mini** : 47 cm  
Hauteur **maxi** : 87 cm

**Freinage centralisé**,  
1 roulette **directionnelle**

**Modèle équipé de barrières métal**

(plusieurs barrières au choix, voir p.67)

La barrière médicalisée ne doit être utilisée que sur recommandation médicale.

**Procline / Décline**  
jusqu'à 16°





Le lit BARIATRIQUE,  
destiné aux établissements de soins  
pour les services de soins courants,  
de soins intensifs et aux établissements  
de cure, permet d'assurer le couchage d'une  
personne de forte taille grâce à sa surface  
de couchage de 110 cm de largeur  
pour un poids maximum de 250 kg.

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Hauteur mini: **45 cm**

Hauteur maxi: **85 cm**

Dimension hors tout: **228 x 120 cm**

Poids maxi du résident: **250 kg**



# LIT BARIATRIQUE

LA8020-HER

## 6 supports potence TPS

6 emplacements dont 4 en tête de lit pour optimiser les soins. Les emplacements en pied de lit permettent aussi de placer la double potence afin de faciliter la sortie de lit du patient

## Relève buste

électrique à translation

L'angle du relève buste a été étudié afin d'éviter toute compression abdominale, et en cas de mouvement du lit, la plicature évite que le patient glisse vers le pied du lit

Couchage en **compact ajouré** pour la respiration du matelas

## Panneaux Clinica

Emmanchement vertical avec verrouillage par tirette. Vous pouvez choisir de créer votre style à partir de la sélection de couleurs

## Télécommande

sur relève buste avec support flexible pour le confort du patient

Position **proclive / décline** jusqu'à 16°

**Freinage centralisé** aux 4 angles du lit

**6 roulettes** dont 2 directionnelles pour une grande stabilité

**Espace soignant dédié**

avec **superviseur** au pilotage simplifié

**Relève pieds électrique**

Pour ne plus solliciter le dos du personnel soignant

Modèle équipé de **barrières métal rehaussées**

et renforcées (hauteur totale barrière : 480 mm), autres modèles de barrières disponibles



**Position haute**  
Maximum : environ 85 cm



**Position basse**  
Minimum environ 45 cm



**Déclive**  
Inclinaison de 0° à 16°



**Proclive**  
Inclinaison de 0° à 16°



**Angle relève buste**  
Inclinaison de 0° à 70°



**Angle relève jambes**  
Inclinaison de 0° à 35°




**Angle relève pieds**  
Inclinaison de 0° à 22°



**Position fauteuil**

Un lit conçu pour **faciliter le travail du personnel soignant** dans sa mission de soin.

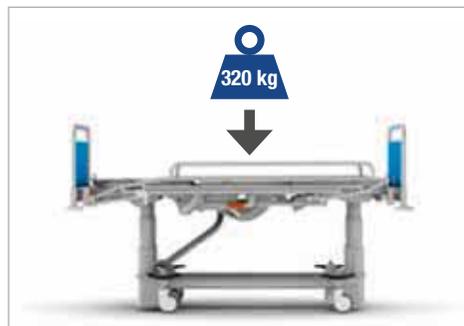

4 colonnes assurent une excellente stabilité ainsi qu'une grande solidité

Charge de fonctionnement de sécurité : 320 kg



6 roulettes dont 2 directionnelles facilitant le brancardage



Relève pieds électrique pour ne plus solliciter le dos du personnel soignant



6 supports potences / TPS, dont 4 emplacements en tête de lit pour optimiser les soins

Une surface de couchage « easy access » pour une hygiène maximale




- Pas de rétention de liquides (structure tubulaire du châssis)
- Châssis bas aéré et facilement accessible
- Tolérance prouvée aux produits de nettoyage et de décontamination

Un chariot adapté pour un déplacement et un stockage facilité LX-CT-L8H


Dimensions hors tout : L : 250 cm • l : 89 cm • h : 150 cm



# SYSTÈME DE PILOTAGE SOIGNANTS /

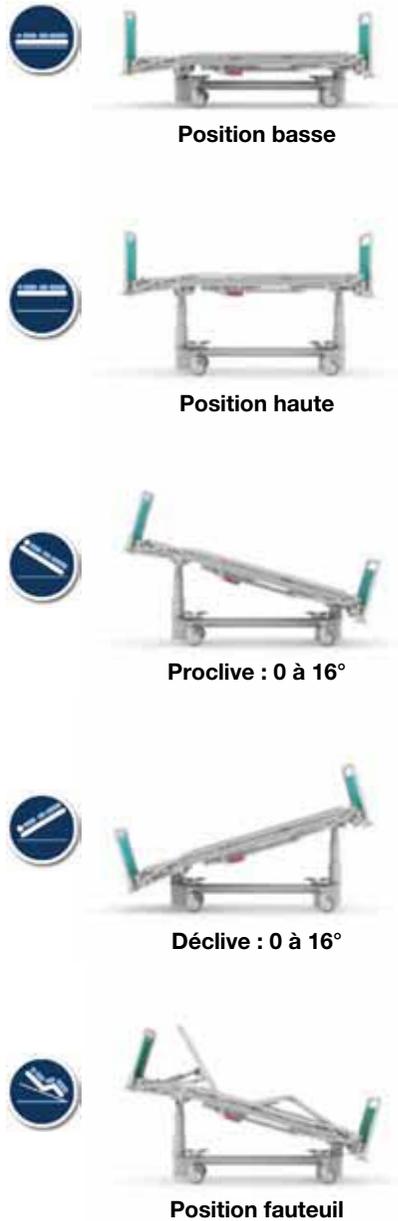


Un pilotage simplifié pour le personnel soignant.

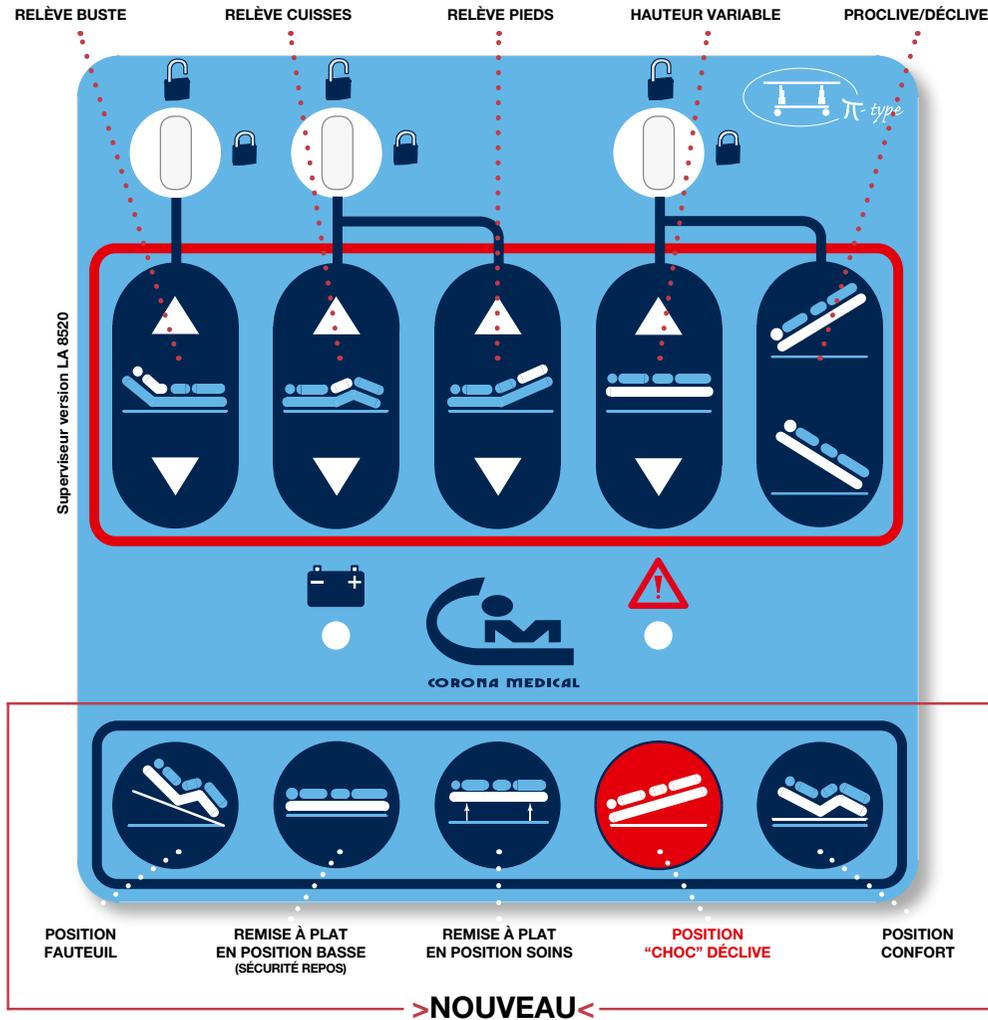

Un superviseur aux fonctions mémorisées avec système de condamnation des fonctions.

Condamnation des fonctions du pilotage soignants

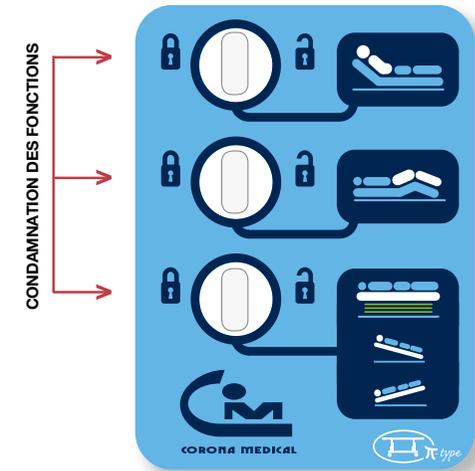

### ERGONOMIE

Un pilotage simplifié pour le patient.



Télécommande patient droite ou gauche pour un confort d'utilisation

Action = Montée  
«presser à gauche»

Action = Descente  
«presser à droite»



RELÈVE-BUSTE



RELÈVE-CUISSSES



SYNCHRONISATION  
RELÈVE-CUISSSES & BUSTE



RELÈVE-PIEDS



HAUTEUR VARIABLE





Corona Médical / **DES SOLUTIONS HOSPITALIÈRES**

LES AVANTAGES PATIENT ET PERSONNEL SOIGNANT **EN 6 POINTS /**

**MOBILITÉ**  
du lit

**HYGIÈNE**  
et nettoyage

**DÉBRAYAGE**  
du relèvement buste



**RELÈVE BUSTE**  
à translation et relèvements cuisses  
synchronisés

 **CORONA MEDICAL**



**BARRIÈRES**  
de lit

**POSITION**  
basse et haute du lit

## RELÈVE BUSTE À TRANSLATION ET RELÈVE CUISSES SYNCHRONISÉE ...

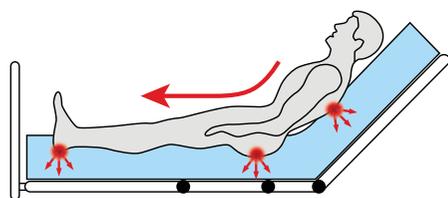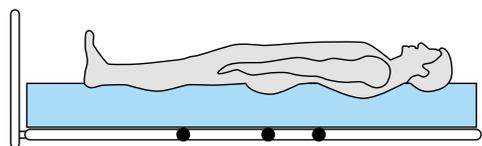

relève buste standard

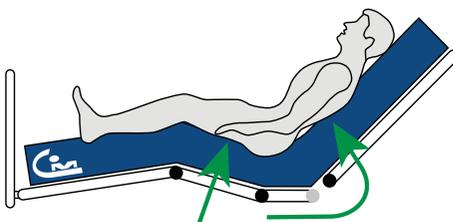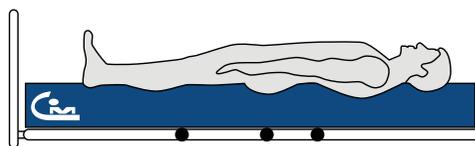

relève buste à translation  
Corona Medical




### Les avantages pour le personnel soignant


- Le patient n'est plus déplacé dans le lit par l'action du relève buste, évitant le travail pénible des re-positionnements

### Les avantages pour le patient


- Le relève buste à translation combinée avec le relève cuisses ne comprime pas les parties abdominales et évite ainsi des douleurs et complications au patient tout en permettant la position assise.
- Le patient reste en place dans le lit.
- Le relève buste à translation supprime la compression sur le fessier réduisant l'apparition d'escarres.

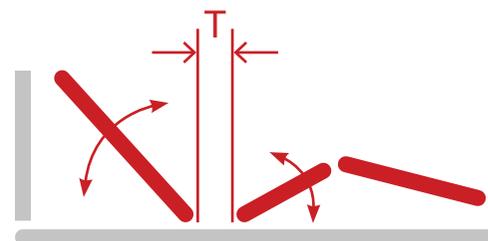

Translation du relève buste : 20 cm (T)

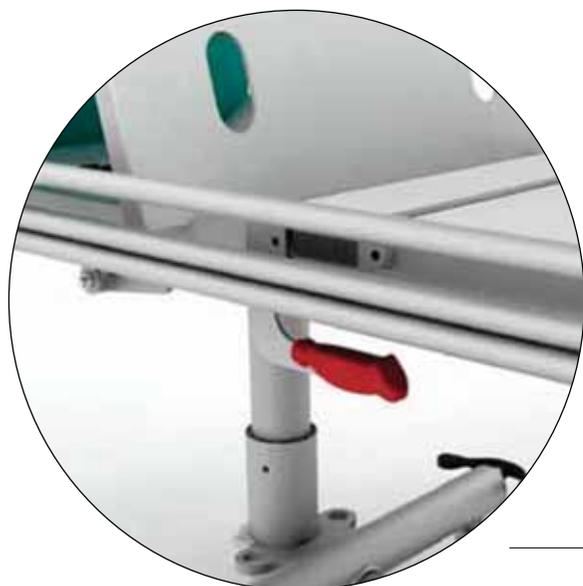

Poignée de débrayage

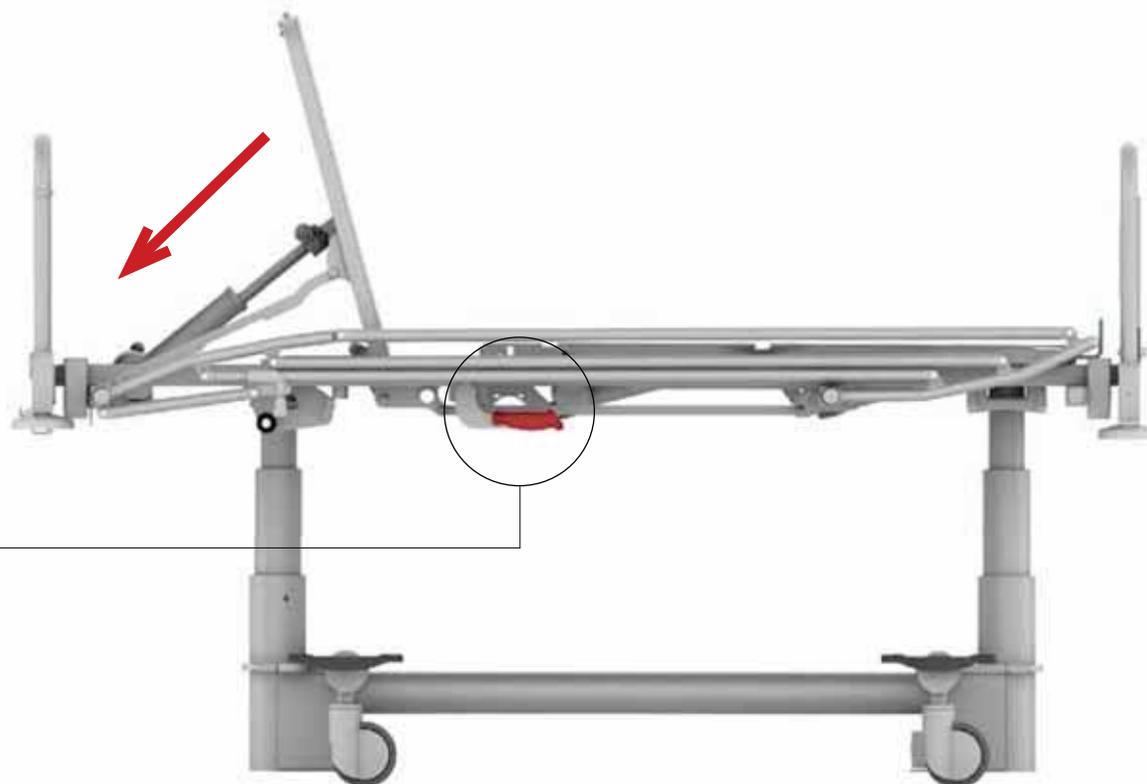

## Les avantages pour le personnel soignant

- Mise en oeuvre rapide du débrayage relève buste grâce à 2 poignées situées de chaque côté du lit.
- Le relève buste descend rapidement en cas d'urgence
- Le relève buste est **freiné automatiquement par le moteur** pour éviter tous chocs brutaux pour le patient.
- Son utilisation est manuelle et reste possible en l'absence de courant

# POSITION BASSE ET HAUTE DU LIT ...

## Lit X-TYPE L5

Hauteur mini/maxi :  
34 cm / 90 cm



### Position basse

Minimum environ 34 cm



### Position haute

Maximum : environ 90 cm

## Lit X-TYPE L8-PF

Hauteur mini/maxi :  
34 cm / 90 cm



### Position basse

Minimum environ 34 cm



### Position haute

Maximum : environ 90 cm

## Lit CANTOU

Hauteur mini/maxi :  
23 cm / 78 cm



### Position basse

Minimum environ 23 cm



### Position haute

Maximum : environ 77 cm

## Lit X-TYPE L8

Hauteur mini/maxi :  
36 cm / 86 cm



### Position basse

Minimum environ 36 cm



### Position haute

Maximum : environ 86 cm

## Lit PI-TYPE L8

Hauteur mini/maxi :  
47 cm / 87 cm



### Position basse

Minimum environ 47 cm



### Position haute

Maximum : environ 87 cm

## Les avantages pour le personnel soignant

→ La position haute importante et **ergonomique** de nos lits rend **confortable** les conditions de travail autour du lit.

## Les avantages pour les patients

→ La position basse de nos lits garantie une **sortie de lit plus aisée** et adaptée à l'ensemble des tailles de personne.

→ Nous disposons également d'un lit (**CANTOU**) avec une position très basse de 23 cm qui **minimise les conséquences de chute** des patients désorientés où agités.

→ Une position fauteuil (**X-TYPE L8-PF**) en position basse participe à l'autonomie et au confort du patient.

## Les avantages pour le personnel soignant

- Nos lits X-TYPE et PI-TYPE avec leurs châssis bas réduits, offre une **grande manoeuvrabilité**.
- Un large choix de roulettes est disponible sur nos lits pour les différents usages, **simple déplacement** dans la chambre ou **brancardage intensif**.
- 4 pédales pour le freinage des lits X-TYPE L8 et PI-TYPE situées aux quatre angles du lit offre une **accessibilité à tout moment**.



**Roue Ø 75 mm double galet**  
pour une mobilité de base  
avec peu de déplacement  
(nettoyage)



**Roue Ø 125 mm classique**  
pour une mobilité facile  
avec un déplacement faible  
(nettoyage, quelques  
brancardages)



**Roue Ø 150 mm classique**  
pour une mobilité faisée avec  
un déplacement courant  
(brancardages réguliers)



**Roue Ø 150 mm intégral**  
pour une mobilité faisée avec  
un déplacement courant  
(brancardages réguliers)



**Roue Ø 150 mm double galets**  
pour une mobilité intensive avec  
un déplacement nombreux  
(brancardage intensif)

## Les avantages pour les patients

- Corona médical vous aide à ne pas oublier d'actionner la freinage du lit ce qui pourrait engendrer une chute des patients et ceci grâce à la **mise en place automatique du freinage en position basse** sur nos lits CANTOU, X-TYPE L5 et X-TYPE L8-PF.

# BARRIÈRES DE LIT ...



barrière **L-805-B**



barrière **L-805-BR**

Les barrières rabattables sont une **solution facile et accessible**.

Elles sont **très fonctionnelles**.

La barrière est amovible rapidement si nécessaire à l'aide des tirettes.

Verrouillage automatique à la montée.

**Simplicité, efficacité et résistance** sont les qualités principales de cette barrière sécurisante.

Respect des exigences de la **marque NF**, ainsi que les normes NF EN 1970 et NF EN 60601-2-38.

Conformité des barrières de lit par rapport à la recommandation **Afssaps** sur son utilisation pour le couchage des "grands enfants" (enfants de taille <146 cm).

Nos barrières sont en positionnement pré-défini, évitant ainsi au personnel le risque de ne pas respecter les espaces de sécurité lorsque la barrière est retirée puis remise en place.

CORONA a fait le choix d'avoir l'espace de sortie en pied de lit, permettant une sortie naturelle du lit **sans risque de piégeage** en tête ou en milieu de lit.

Barrière compatible avec matelas thérapeutique avec une épaisseur inférieure ou égale à 160 mm.

Les barrières peuvent être élevées à l'aide d'un barreau supplémentaire. De cette manière, la protection est optimale afin d'éviter que le patient ne tombe du lit en particulier avec des matelas spécifiques hauts supérieur à 160 mm (matelas prévention escarres).

Les lits fabriqués par **Corona Médical** sont **faciles à nettoyer** et à préparer pour l'arrivée du patient.

**Corona Médical** préconise quatre protocoles de décontamination pour **minimiser les risques d'infections nosocomiales** :



## Généralités sur le lit

- Il doit être nettoyé et désinfecté régulièrement
- Le personnel effectue les tâches de nettoyage et de désinfection dans un minimum de temps et avec un maximum d'efficacité
- Il comporte un minimum de surface à nettoyer
- Il permet un accès aisé aux différentes parties du lit
- Les zones de rétention de liquide sont éliminées
- Pas de capotage sur le lit minimisant ainsi les surfaces et supprimant les zones non accessibles au nettoyage

 ..... Quotidien

 +  ..... Hebdomadaire

 +  +  ..... Départ du patient (dans le cas de patient non infecté)

 +  +  +  ... Nettoyage à fond (après le départ d'un patient infecté ou dans les services à haut risque de contamination)

# LES DOSSERETS ...



## **CINTEA** emmanchement horizontal

Dossieret adapté au brancardage

**Protection dossieret :** 2 butoirs rotatifs Ø 120 mm

**Dimensions hors tout :** 89,2 x 56,2 x 3,2 cm

**Hauteur panneau par rapport au sommier :** 37,5 cm

**Masse d'un panneau :** 5,6 kg

**Cintre :** tube acier Ø 32 mm avec revêtement époxy

**Panneau bois :** panneau de particule ép. 16mm avec 2 faces stratifiées chant ABS

**Coloris :** Sélection CORONA

**Classement au feu :** M2 (parties métalliques) - M3 (parties bois)



## **CLINICA** avec verrouillage - Emmanchement vertical

Dossieret adapté au brancardage, compatible avec cadre de traction

**Protection dossieret :** 2 butoirs rotatifs Ø 120 mm

**Dimensions hors tout :** 89,2 x 56,2 x 3,2 cm

**Hauteur dossieret par rapport au sommier :** 37,5 cm

**Masse d'un dossieret :** 5,6 kg

**Cintre :** tube acier Ø 32 mm avec revêtement époxy

**Panneau bois :** panneau de particule ép. 16mm avec 2 faces stratifiées chant ABS

**Rallonge de sommier intégrée :** +20 cm actionnable par tirettes pour le panneau pied

**Coloris :** Sélection CORONA

**Classement au feu :** M2 (parties métalliques) - M3 (parties bois)



## **ULTIMA** avec verrouillage - Emmanchement vertical

**Protection dossieret :** 2 butoirs rotatifs Ø 120 mm

**Dimensions hors tout :** 95,6 x 53 x 7 cm

**Masse d'un dossieret avec tablette :** 7,5 kg

Dossieret rotomoulé polyéthylène

**Panneau pied avec tablette :** panneau de particule ép. 16mm avec 2 faces stratifiées chant ABS

**Coloris :** Sélection CORONA

**Verrouillage :** tirette actionnable par une main


**Rallonge de sommier intégrée :** +20 cm actionnable par tirettes pour le panneau de pied

**Classement au feu :** M2 (parties métalliques) - M3 (parties bois)



## Pied **CLINICA**

Tablette et rallonge vertical  
Emmanchement vertical

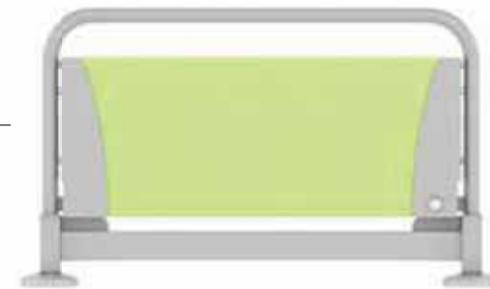

Dossieret adapté au brancardage  
**Protection dossieret** : 2 butoirs rotatifs Ø 120 mm  
**Dimensions hors tout** : 89,2 x 56,2 x 3,2 cm  
**Hauteur dossieret par rapport au sommier** : 37,5 cm  
**Masse d'un dossieret** : 5,6 kg  
**Cintre** : tube acier Ø 32 mm avec revêtement époxy  
**Panneau bois** : panneau de particule ép. 16mm avec 2 faces stratifiées chant ABS  
**Coloris** : Sélection CORONA  
**Verrouillage** : tirette actionnable par une main  
**Tablette** : 80 x 29 cm inclinable par crémaillères 5 positions  
**Charge maxi** : 15 kg  
**Classement au feu** : M2 (parties métalliques)  
M3 (parties bois)

## Tête **CLINICA**

Coulissante

Dossieret adapté au brancardage  
**Protection dossieret** : 2 butoirs rotatifs Ø 120 mm  
**Dimensions hors tout** : 89,2 x 56,2 x 3,2 cm  
**Hauteur dossieret par rapport au sommier** : 37,5 cm  
**Masse d'un dossieret** : 5,6 kg  
**Cintre** : tube acier Ø 32 mm avec revêtement époxy  
**Panneau bois** : panneau de particule ép. 16mm avec 2 faces stratifiées chant ABS  
**Coloris** : Sélection CORONA  
Dossieret escamotable coulissant verrouillable par tirette



Le concept des barrières latérales des lits médicalisés  
**Corona Médical** a été conçu pour les soins au quotidien.

Les barrières latérales pleine longueur assurent une **sécurité optimale**  
pour les personnes **semi ou complètement dépendantes**  
(recommandé pour les niveaux de soins 1 à 3).

Les configurations sans barrières latérales mais avec longerons  
sont recommandées pour les résidents **valides à semi-valides**  
(recommandé pour le niveau de soin 0) ou la nuit pour les **patients désorientés**  
(prévoir dans ce cas le matelas de sol LX-MS100).

Les autres configurations de barrières sont à utiliser **selon les contraintes**  
pathologiques des résidents et les habitudes des établissements.

Respect des exigences de la marque NF, ainsi que les normes  
NF EN 1970, NF EN 60601-2-38 et NF EN 60601-2-52

Conformité des barrières de lit par rapport à la **recommandation Afssaps** sur son utilisation pour le  
couchage des “grands enfants” (enfants de taille <146 cm).

Besoins identifiés pour le couchage de ces “grands enfants”:

- L’espace entre les barreaux (ou deux éléments de structure) est inférieur ou égal à 65 mm
  - L’espace entre le sommier et le bas de la barrière est inférieur ou égal à 65 mm
- (La dimension de 65mm correspond à l’exigence de la norme lits-parcs NF EN 716-1 et -2)

***Nous rappelons que La barrière doit être utilisée que sur prescription médicale après appréciation du rapport bénéfice/risque, pour éviter la chute du patient.***

***Autant que possible, en dehors des soins, le lit doit être mis en position basse, pour limiter les conséquences en cas de chute.***

***Les barrières de lits médicaux (contrairement aux barrières des lits-parcs destinés aux enfants de 0 à 3 ans environ) sont conçues pour éviter la chute des patients pendant leur sommeil et leur transport, non pour empêcher les patients de sortir volontairement de leur lit.***

# SYSTÈMES DE BARRIÈRES

Les barrières L-800-B rabattables sont une solution facile et accessible. Elles sont très fonctionnelles et en cas de chute du patient, il est garanti que les pieds toucheront le sol en premier (surface sécuritaire prévue à cet effet)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Verrouillage automatique à la levée  
Verrou de barrière sur barreau inférieur

**Hauteur de la barrière par rapport au sommier:** 38 cm

Tube acier diamètre 25 mm / **Revêtement:** peinture époxy  
**Épaisseur maxi conseillée pour le matelas:** inférieur à 15 cm




## DÉTAILS DES BARRIÈRES



**Système de verrouillage de barrières**



**Barrière réhaussée** pour les matelas supérieur à 15 cm

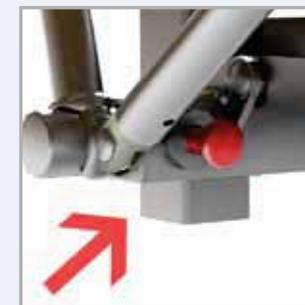

**Système de démontage de barrières (clic rapide)**

# SYSTÈMES DE BARRIÈRES

Les barrières L-805-B rabattables sont une solution facile et accessible. Elles sont très fonctionnelles et en cas de chute du patient, il est garanti que les pieds toucheront le sol en premier (surface sécuritaire prévue à cet effet)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Verrouillage automatique à la levée  
Verrou de barrière sur barreau inférieur

Hauteur de la barrière par rapport au sommier: 38 cm

Tube acier diamètre 25 mm / Revêtement: peinture époxy  
Épaisseur maxi conseillée pour le matelas: inférieur à 15 cm

L-805-B



Les barrières L-805-BR peuvent être élevées à l'aide d'un barreau supplémentaire. De cette manière, la protection est optimale afin d'éviter que le patient ne tombe du lit en particulier avec des matelas spécifiques hauts (matelas prévention escarres)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Verrouillage automatique à la levée  
Verrou de barrière sur barreau inférieur

Hauteur de la barrière par rapport au sommier: 48 cm

Tube acier diamètre 25 mm / Revêtement: peinture époxy  
Épaisseur maxi conseillée pour le matelas: 15 cm à 25 cm

L-805-BR



# SYSTÈMES DE BARRIÈRES



Chez les patients agités qui risquent de se blesser lors des chutes, il est recommandé de remplacer la barrière par ce longeron L-800-S

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Tube acier méplat 60x30 (qualité A2)

**Revêtement:** Peinture époxy

# COUCHAGE COMPACT

Le compact est un stratifié haute pression épais aux avantages nombreux (HPL: High Pressure Laminate).



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### RÉSISTANCE ☒

Résistance à la rayure et à l'abrasion  
Résistance aux agressions chimiques et domestiques  
Résistance à la fissuration  
Résistance aux chocs : extrêmement résistant et difficile à dégrader

### ENTRETIEN ☒

**Facilité d'entretien :** s'adapte parfaitement à l'environnement humide.  
Entretien facile au jet d'eau (hydrofuge)

### NORMES ☒

**Classement au feu :** M3  
L'ensemble est conforme à la norme EN 438



**Couchage compact**  
sur lit X-type DP L8 (option)



**Détail du compact**

# COUCHAGE À LATTES

Couchage composé  
de lattes amovibles  
en matière composite.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### RÉSISTANCE

Résistance aux agressions chimiques et domestiques  
Résistance aux chocs: extrêmement résistant  
et difficile à dégrader

### ENTRETIEN

**Facilité d'entretien:** s'adapte parfaitement  
à l'environnement humide.  
Nettoyage aisé dans les bacs à douche

### NORMES

**Classement au feu:** I2  
**Classement fumée:** F1



**Couchage à lattes**  
sur lit X-type DP L8




**Détail des lattes**

# NOS MODÈLES DE MATELAS /

## • MATELAS DE CONFORT

À articulation

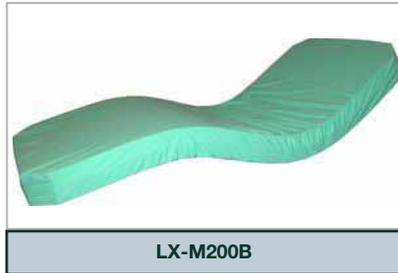

LX-M200B

**DIMENSIONS :**

- L 1980 mm • Larg. 860 mm
- Ép. 130 mm

## • MATELAS DE PRÉVENTION DE L'ESCARRE

Gaufrier CARFLEX



LX-M410B

**DIMENSIONS :**

- L 1950 mm • Larg. 860 mm
- Ép. 170 mm

Viscoélastique CARGUMIX



LX-M500B

**DIMENSIONS :**

- L 1980 mm • Larg. 860 mm
- Ép. 140 mm

Mousse très élastique CARSOFT





LX-M510B

**DIMENSIONS :**

- L 1980 mm • Larg. 860 mm
- Ép. 160 mm

## • MATELAS DE CONFORT ET DE PRÉVENTION DE L'ESCARRE POUR LIT BARIATRIQUE

Matelas LX-M200B-HER

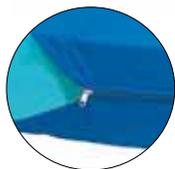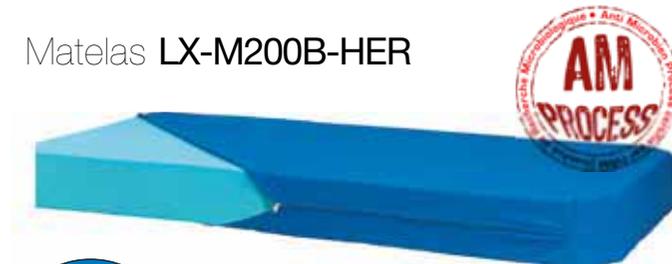

Ce **matelas de confort** est particulièrement étudié pour donner satisfaction aux patients et résidents séjournant dans un lit médicalisé. Son atout principal est sa **grande flexibilité** qui lui permet d'épouser parfaitement le plan de couchage articulé du lit **sans dégrader la mousse au niveau des articulations**, ni créer de gêne pour l'utilisateur.

**DIMENSIONS :**

- L 200 cm • Larg. 110 cm • Ép. 18 cm

**DENSITÉ :**

- 55 kg/m<sup>3</sup>

Matelas LX-M400B-HER



Sa surface découpée en de nombreux plots assure une **homogénéité des zones** d'interface avec le patient, lui assurant un **parfait maintien** avec un **minimum de points de pression**.

**DIMENSIONS :**

- L 200 cm • Larg. 110 cm • Ép. 18 cm

**DENSITÉ :**

- 55 kg/m<sup>3</sup>

→ Mousse haute résilience HR traitement **anti bactérien AM Process**.

→ 4 angles tronqués laissant l'**accessibilité aux accessoires d'angle** (potence, TPS...).

→ Housse de matelas avec fermeture à glissière **protégée de l'agression des liquides** par un double rabat.

### • EXTENSIONS DE LIT

Kit extension de lit



Kit extension de lit	LX-ME-2
Kit extension de lit bariatrique	LX-ME-2-HER

Plaque support matelas



Plaque support matelas	LX-ME-1
Plaque support matelas bariatrique	LX-ME-1-HER

### • AIDE À LA MOBILITÉ



Potence avec poignée fixe 1 position	LX-P1010
Potence avec poignée fixe 3 positions	LX-P1028
Potence avec poignée enrouleur 3 positions	LX-P1028-ENR



Potence double	LX-P1030-HER
----------------	--------------

### • SÉCURITÉ PATIENT



LX-MS100

#### Matelas de sol

permettant d'atténuer la chute du patient

#### DIMENSIONS :

• L 1950 mm • Larg. 860 mm • Ép. 40 mm

Norme supplémentaire: GPEM/CP D1 90 classe A



Cale matelas latéral LX-CM



Barrière Bout de lit permettant la fermeture totale du lit LX-B1080-BB

PORTE CONTENANT LITS **X-TYPE L8 et PI-TYPE L8**




Hauteur fixe	LX-TPS
Hauteur réglable par système à vis	LX-TPSR
Hauteur télescopique et bloquable	LX-TPSRB
Équipée de 5 roulettes 4 crochets plastiques	LX-715-2



Support pour accrochage de poche à urine LX-106




Support urinal sur rail LX-109

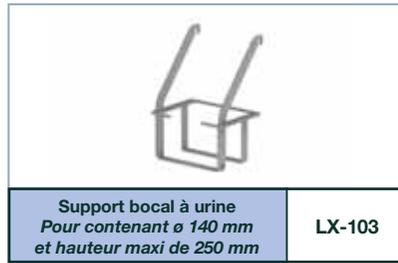

Support bocal à urine  
Pour contenant ø 140 mm  
et hauteur maxi de 250 mm LX-103



Porte redons  
Pour contenant ø 90 mm  
et hauteur maxi de 250 mm LX-107

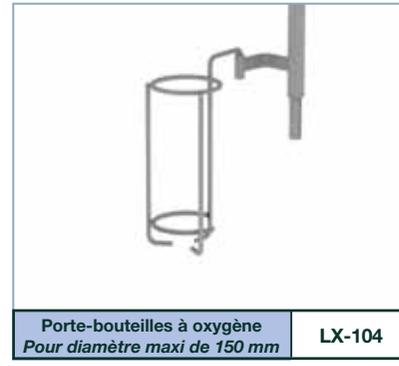

Porte-bouteilles à oxygène  
Pour diamètre maxi de 150 mm LX-104



Porte bassin et urinale  
à fixer au mur LX-1007



Porte nom pour dossieret  
modèle clinica (par 3) LX-D2913




Tablette sur barrières LX-TAM-B

PORTE CONTENANT LITS **X-TYPE L5 / CANTOU / X-TYPE L8-PF**



Support pour accrochage de poche à urine 4 crochets LX-108



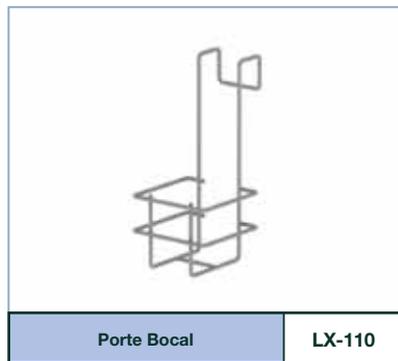


Porte Bocal LX-110



Porte bassin sur châssis haut LX-111

## PROTECTION DES MURS LITS X-TYPE L8 et PI-TYPE L8

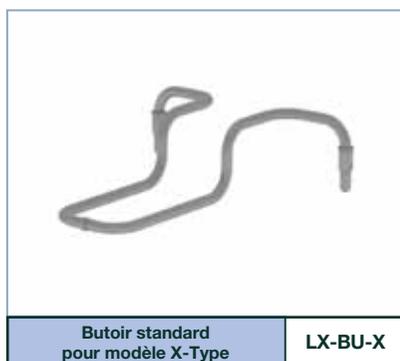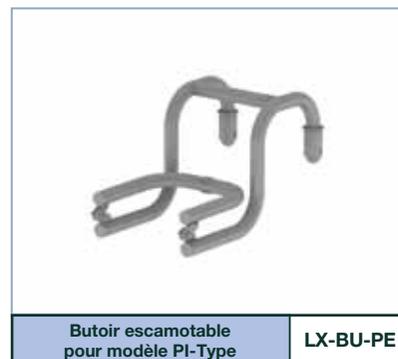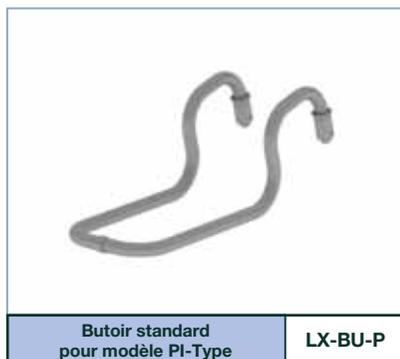


## PROTECTION DES MURS LITS X-TYPE L5 / CANTOU / X-TYPE L8-PF


- LIT X-TYPE L5 / POSITION FAUTEUIL



- LIT CANTOU

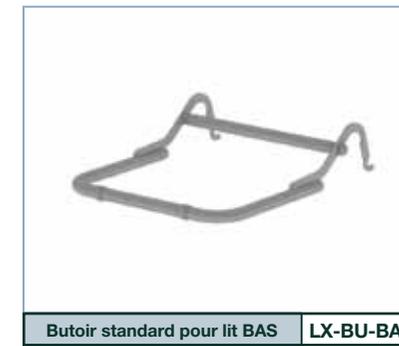



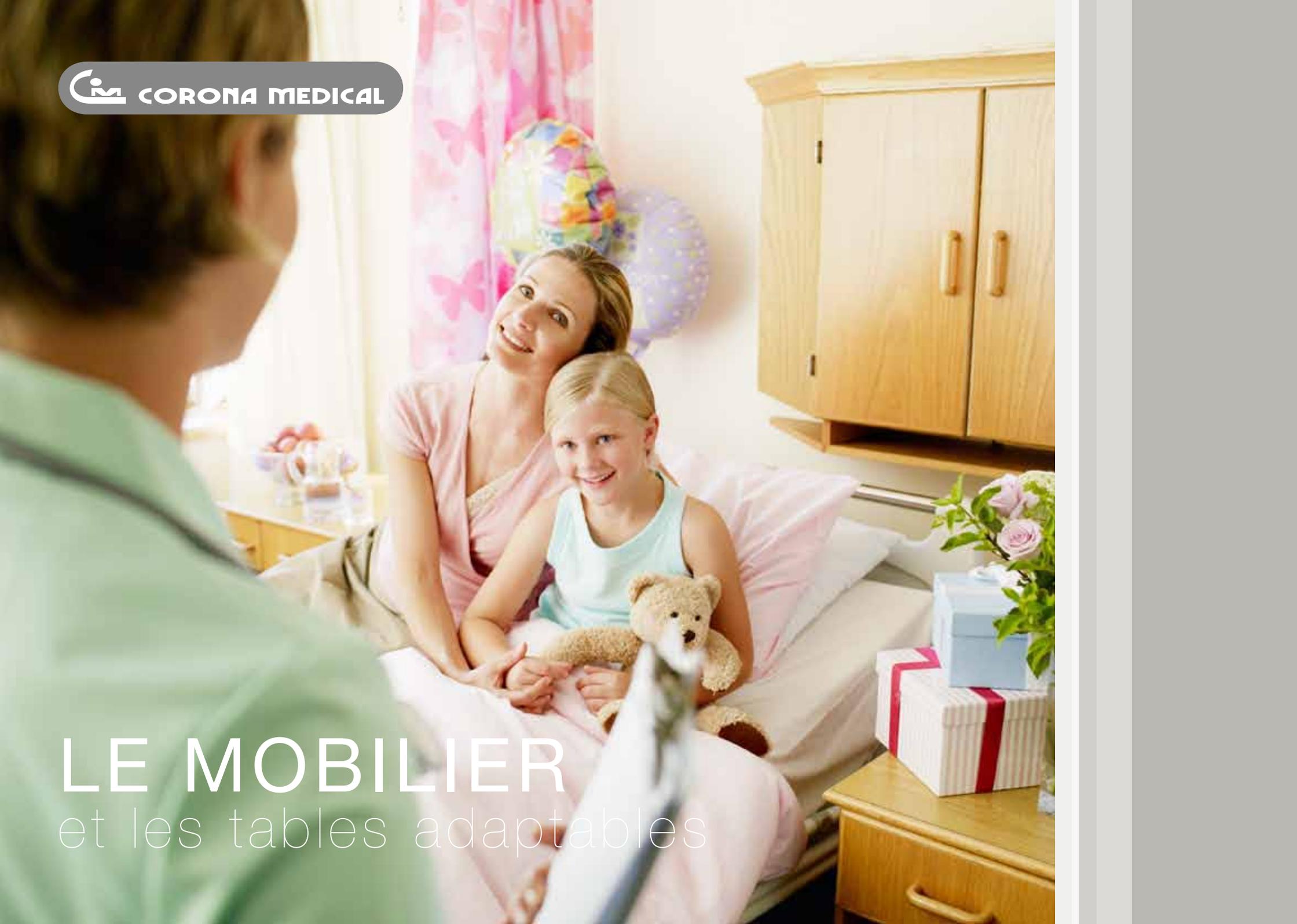

# LE MOBILIER

et les tables adaptables

# Les Tables adaptables

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### DIMENSIONS

L 950 mm - P 450 mm - H 760 mm

### SYSTÈME D'ÉLÉVATION / DESCENTE

Vérin à gaz

### AMPLITUDE DE LA HAUTEUR VARIABLE

34 cm

### HAUTEUR AVEC ROULETTES Ø 50 MM

Mini: 760 mm / Max: 1 100 mm

### PLATEAU

L 750 mm - P 450 mm - H 17 mm  
(sauf modèle T102F: L 950 mm)

### PIÉTEMENT

en U

### CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ

25 kg

### FINITION

Époxy Silver

### NORMES

Classement au feu: M2 - M3 (parties bois)

## TABLES ADAPTABLES PLATEAU FIXE

- Hauteur variable réglable manuellement

Désignation	Référence
Plateau principal mélaminé stratifié avec chant ABS	MA-T100F
Plateau principal mélaminé stratifié avec chant ABS <sup>(1)</sup>	MA-T100FB

(1) Plateau latéral: bac thermoformé amovible

## TABLES ADAPTABLES PLATEAU INCLINABLE

- Hauteur variable réglable manuellement

Désignation	Référence
Plateau principal mélaminé stratifié avec chant ABS <sup>(1)</sup>	MH-T100
Plateau principal thermoformé <sup>(1)</sup>	MH-T104

(1) Plateau latéral: bac thermoformé amovible

## TABLES ADAPTABLES • Hauteur variable assistée par vérin à gaz / Plateau fixe ou inclinable (suivant modèle) / Inclinaison par crémaillère autobloquante 5 positions



**TABLE MA-T100F**

- Plateau principal mélaminé stratifié avec chant ABS



**TABLE MA-T100FB**

- Plateau principal mélaminé stratifié avec chant ABS



**TABLE MA-T100**

- Plateau principal mélaminé stratifié avec chant ABS



**TABLE MA-T104**

- Plateau principal thermoformé

# Les Chevets

## Les chevets offrent un large choix de fonctionnalités

- Leur conception assurent un **grand confort** aux patients grâce aux espaces de rangement aménagés : un ou deux tiroirs coulissants avec bac amovible, étagère de rangement...tout en **respectant les normes** (classement au feu bois : M3)
- Le caisson et la façade des chevets sont en panneau de particules d'épaisseur 16 mm et recouverts de stratifié extérieur de 0,8 mm, qui assure une **forte résistance aux chocs**
- Le postformage des façades et des caissons assurent une **parfaite hygiène**
- Les charnières autorisent une ouverture de 270°
- Le plateau : un bac thermoformé en plastique de 3 mm, est résistant et amovible pour **faciliter le nettoyage**
- Le socle, en mousse polyuréthane gris, est équipé de 4 roulettes double galets de diamètre 50 mm pour une **hygiène maximale** et pour assurer la **protection des murs** et du chevet
- Enfin, les chevets sont **conformes et certifiés à la marque NF santé**



### CHEVET AXEA ABSOLU

2 tiroirs - 1 casier coulissant

Référence >> MA-CHX-AB

Dimensions hors tout >> 490 x 490 x 943 mm

# l e s Chevets



## CHEVET AXEA ABSOLU

2 tiroirs - 1 porte

Référence > MA-CHX-AB

Dimensions hors tout > 490 x 490 x 943 mm

Plateau avec bac thermoformé amovible

Socle en mousse - 4 roulettes -

Postformage de la facade



## CHEVET AXEA MAJEUR

1 tiroir - 1 porte

Référence > MA-CHX-MA

Dimensions hors tout > 490 x 490 x 943 mm



## CHEVET AXEA MILLESIME

2 tiroirs - 1 porte

Référence > MA-CHX-MI

Dimensions > L 502 mm / l 515 mm / H 943 mm

Plateau avec bac thermoformé amovible

Socle en mousse - 4 roulettes -

Postformage de la facade

Réfrigérateur intégré 30 L



## CHEVET AXEA ARTEA

1 tiroir - 1 porte

Référence > MA-CHX-ART

Dimensions hors tout > 490 x 490 x 826 mm

# Le mobilier de chambre

Le mobilier de chambre permet de compléter la chambre de façon harmonieuse et esthétique.

→ Le caisson des mobiliers de chambre est en panneau de particules de 16 mm d'épaisseur aux faces extérieures stratifiées

Le mobilier de chambre est conforme et certifié NF santé

## ARMOIRE MATEA

### DÉTAILS :

>> Les portes sont en panneau de particules de 16 mm d'épaisseur aux faces extérieures en stratifié, avec charnières visibles à ouverture de 270°.

Modèle	2 portes 1 penderie 3 étagères	+2 tiroirs bas
Largeur		
582 mm	MA-AAC-100	MA-AAC-110
782 mm	MA-AAC-200	MA-AAC-210
982 mm	MA-AAC-300	MA-AAC-310



MA-AAC-100

# le mobilier de chambre

## COMMODE MATEA

### DÉTAILS :

- >> Le plateau supérieur est postformé et assure une hygiène parfaite.
- >> La ceinture de tiroir est en panneau de particules de 12 mm d'épaisseur et est complété d'un chant PVC.
- >> Le fond du tiroir est en panneau de particule de 4 mm d'épaisseur.

Modèle	3 tiroirs	4 tiroirs	2 tiroirs hauts 2 tiroirs bas
582 mm	MA-CMAC-101	MA-CMAC-102	MA-CMAC-103
782 mm	MA-CMAC-201	MA-CMAC-202	MA-CMAC-203
982 mm	MA-CMAC-301	MA-CMAC-302	MA-CMAC-303



MA-CMAC-102

## TABLES MATEA

### DÉTAILS :

- >> Les plateaux sont en panneau de particules de 16 mm d'épaisseur aux faces extérieures en stratifié postformé.
- >> Le piétement est revêtu d'une peinture époxy.

Modèle		1 tiroir	1 tiroir 1 niche	
800 mm	MA-TAAC-211	MA-TAAC-221	MA-TAAC-231	MA-TAAC-241
1000 mm	MA-TAAC-311			MA-TAAC-341
1200 mm	MA-TAAC-411			MA-TAAC-441



MA-TAAC-241



MA-TAAC-211





# LES FAUTEUILS

repos et transferts



Sa robustesse, sa praticité et son confort répondront parfaitement aux exigences du résident comme du personnel soignant

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Hauteur d'assise : **47 cm**

Dimension hors tout: **68 x 69 x 119 cm**

Poids maxi du résident : **135 kg**



**2 roulettes**  
pour aider au déplacement



**Accoudoirs réglables**  
et escamotables (5 positions)  
en mousse TPU



**Option**



**Dossier inclinable**

FAUTEUIL DE **REPOS**

FA750-PRE+ / FA750-ABS

**Accoudoirs**  
en mousse TPU  
réglables et escamotables  
au niveau de l'assise  
pour faciliter le transfert

**Dossier inclinable**  
commandé par commande bilatérale

**Les Assises / dossiers**  
sont ergonomiques

et anatomiques (respect de la lordose)  
avec renfort lombaire  
Mousse HR : 2 variantes de densité  
pour optimiser la posturologie sur l'assise  
et le dossier

**La structure tubulaire**  
du châssis évite la rétention  
des liquides et le nettoyage  
et la décontamination

**2 roulettes**  
pour aider au déplacement

**Support tige**  
à perfusion en standard



Sa robustesse, sa praticité et son confort répondront parfaitement aux exigences du résident comme du personnel soignant pour des transferts en toute sécurité et sérénité.

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Hauteur d'assise : **47 cm**

Dimension hors tout : **73 x 77 x 121 cm**

Poids maxi du résident : **135 kg**



**Accoudoirs escamotables**  
pour faciliter le transfert



**Repose-pieds**  
4 positions



**4 roulettes**  
Ø 125 mm pour transfert aisé



**Pédales bilatérales**  
pour le freinage du fauteuil

FAUTEUIL DE **TRANSFERT**

FA950-PRE+ / FA950-ABS



Tête amovible

**Dossier inclinable**  
commandé par commande bilatérale

**Accoudoirs**  
en mousse TPU  
réglables et escamotables  
au niveau de l'assise  
pour faciliter le transfert

**Les Assises / dossiers**  
sont ergonomiques

et anatomiques (respect de la lordose)  
avec renfort lombaire  
Mousse HR : 2 variantes de densité  
pour optimiser la posturologie sur l'assise  
et le dossier

**La structure tubulaire**  
du châssis évite la rétention  
des liquides et le nettoyage  
et la décontamination

**Pédale bilatérale**  
pour le freinage du fauteuil

**4 roulettes**  
diamètre 125mm  
pour un transfert aisé

**Repose-pieds réglables**  
en profondeur (4 positions)  
avec système anti-basculement

**Support tige**  
à perfusion en standard


# SÉLECTION DE DÉCORS

DÉCORS EN STRATIFIÉ

## Collection PASTEL




Pétale de rose

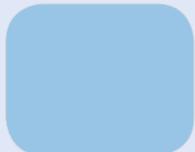

Bleu Oslo



Tilleul

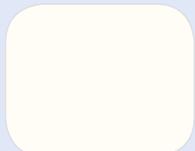


Blanc Megève

## Collection Tonique



Bouton-d'or

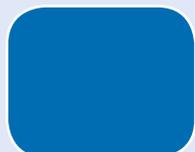

Bleu Océan



Émeraude



Rouge Cerise

## Collection Traditionnelle



Damask  
Porcelaine



Aquarelle  
Orangeade

Façades, dessus  
et côtés des meubles.  
Facilité de nettoyage,  
résistance à l'abrasion  
et à la chaleur

## DÉCORS EN MÉLAMINE

### Collection Tendance



Vert d'eau



Cerise



Cappuccino



Avocat

### Collection Classique



Beige



Safran



Iris



Vanille



Paprika

LES DÉCORS ET TISSUS

# SÉLECTION DE TISSUS

## Collection tissus DIABOLO




Dossier et assise :  
Facilité de nettoyage,  
résistance à l'abrasion,  
au feu (M1) et à la chaleur

## Collection tissus GINGKO





## Collection tissus CUZCO

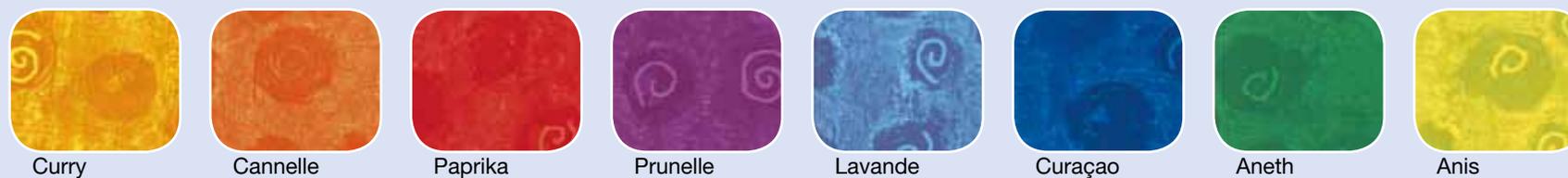

Les teintes des décors et des tissus se rapprochent au mieux de la réalité mais n'ont pas de caractère contractuel

Les teintes bois et les coloris se rapprochent au mieux de la réalité mais n'ont pas de caractère contractuel

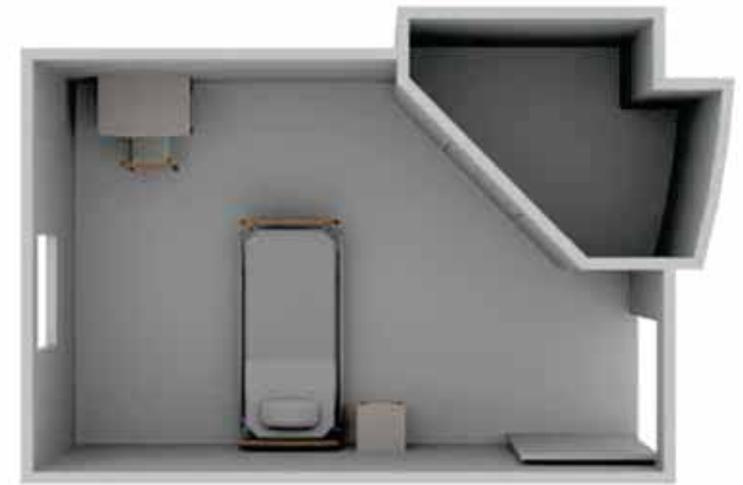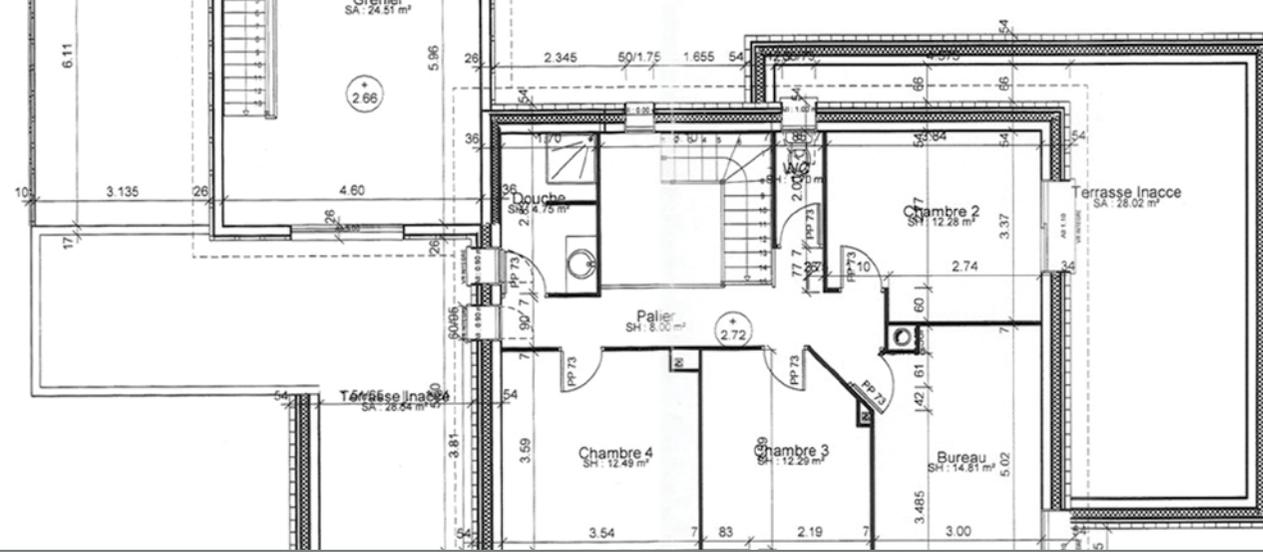

# Agencement

Corona Médical vous assiste pour le développement et la mise en place de solutions globales

Les collaborateurs de notre bureau d'étude vous feront profiter de leur expérience en intégrant vos idées dans des propositions d'aménagement

Notre objectif est de créer une relation durable, basée sur l'échange d'idées

Qu'il s'agisse d'une aide individuelle de conseil et d'étude, Corona Médical sera à votre écoute, et nos spécialistes en aménagement intérieur vous assisteront avec des propositions taillées sur mesure



# Service après-vente

---

Corona Médical vous assiste grâce à son système qualifié d'inspection et d'entretien

L'expertise Corona Médical garantit que vos équipements de soins remplissent à tout moment les exigences envers nos dispositifs médicaux

Des prestations de services, allant du montage jusqu'à l'entretien et la maintenance, complètent notre offre



## Engagement

**Corona Médical** s'engage à sélectionner des partenaires-fournisseurs respectueux de l'environnement contribuant à diminuer les impacts environnementaux liés à la réalisation de ses produits.

## Résultats

- ▶ Tous les bois utilisés pour la réalisation des produits Corona Médical sont issus de forêts gérées durablement et nos fournisseurs appartiennent à la chaîne de contrôle PEFC.
- ▶ Tous les panneaux de particules des mobiliers sont classés E1, c'est-à-dire absence ou très légère trace de formol (formaldéhyde) pour le respect de l'environnement et la protection de la santé.
- ▶ Dans le cadre de la prévention de la couche d'ozone, les mousses constituant nos produits ne contiennent pas de CFC (chlorofluorocarbure).
- ▶ Conformément au NF Environnement, nos pièces plastiques > 50 g sont identifiées afin de faciliter leur recyclage.
- ▶ La démarche pro-active de Corona Médical sur le règlement REACH permet d'attester la conformité de ses produits face à ce règlement.





# VOS CONTACTS



Hygiène  
Solidité  
NF medical  
Sécurité  
confort  
Solidité  
NF sa  
Solidité  
Hygiène  
Sécurité  
NF medical  
Solidité  
confort  
Solidité

Corona Médical • Z.A. La Fosse Neuve • Route de Meslay • 37 210 Parçay Meslay • France

**SERVICE CLIENTS :** Tél.: +33 (0)2 47 885 885 • Fax: +33 (0)2 47 885 893

**SERVICE APRÈS-VENTE :** Tél.: +33 (0)2 47 885 875 • Fax: +33 (0)2 47 885 811

[www.corona-medical.com](http://www.corona-medical.com)

Les photos ne restituent pas obligatoirement la couleur exacte des produits.  
La société Corona Médical se réserve le droit de modifier les modèles présentés dans ce catalogue, sans préavis, dans le seul but de les améliorer et dégage toute responsabilité de toute erreur typographique qui pourrait être relevée. Ce document n'a pas de valeur contractuelle. Imprimé en France

ZCA1A-CORONA MÉDICAL 03/2011 - RÉF.: YCM-ZCA1A-01-FR

